

DropSafe®

Safety Needle LD

Safety Needle


Hypodermic needle used in conjunction with a standard syringe. This device is used for aspiration and administration of medication. Fits Luer Lock syringes.

Aguja de seguridad


La aguja hipodérmica se usa junto con una jeringa estándar. Este dispositivo se usa para la aspiración y administración de medicamentos. Se adapta a las jeringas tipo Luer Lock.

Aiguille de sécurité

Aiguille hypodermique utilisée avec une seringue standard. Ce dispositif est utilisé pour l'aspiration et l'administration de médicaments. Convient aux seringues Luer Lock.

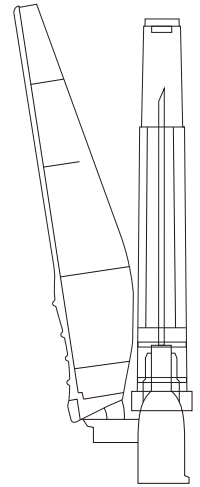


Instructions for use / Instrucciones de uso / Mode d'emploi

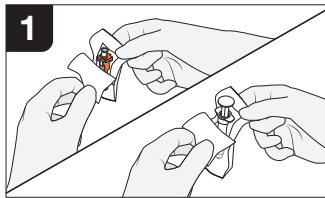

Peel blister pack of the syringe and the safety needle using aseptic technique.

Despegue el empaque del blíster de la jeringa y la aguja de seguridad utilizando la técnica aséptica.


Enlevez le blister de la seringue et de l'aiguille de sécurité en utilisant une technique aseptique.

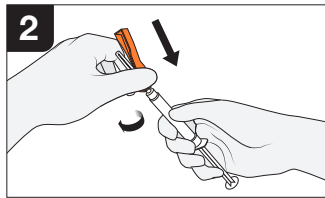

Attach the safety needle to the syringe. Ensure the attachment is firm.

Coloque la aguja de seguridad en la jeringa. Asegúrese de que el ajuste esté firme.


Fixez l'aiguille de sécurité à la seringue. Assurez-vous que la fixation est sûre.

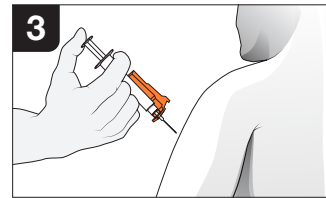

Consult the medication prescribing information. Administer the medication according to the established protocol.

Consulte la información de la prescripción del medicamento. Administre el medicamento de acuerdo con el protocolo establecido.


Consultez les informations relatives à la prescription des médicaments. Administrez le médicament selon le protocole établi.

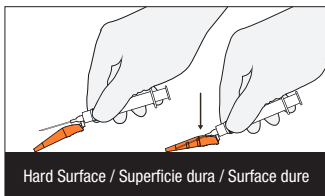


Press down on a flat surface until you feel or hear an audible click, indicating the cover is securely locked over the needle.

Presione hacia abajo sobre una superficie plana hasta que sienta o escuche un clic, lo que indica que la tapa está bloqueada de forma segura en la aguja.

Appuyez sur une surface plane jusqu'à ce que vous sentiez ou entendiez un clic audible, indiquant que le cache est bien verrouillé sur l'aiguille.

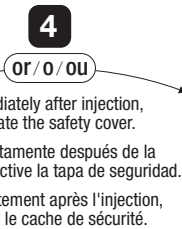

Immediately after injection, activate the safety cover.
Inmediatamente después de la inyección, active la tapa de seguridad.
Immédiatement après l'injection, activez le cache de sécurité.

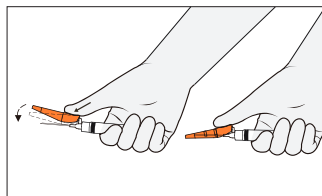

Use thumb to push the safety cover onto the needle until you feel or hear an audible click, indicating the cover is securely locked over the needle.

Utilice el pulgar para empujar la tapa de seguridad en la aguja hasta que sienta o escuche un clic, lo que indica que la tapa está bloqueada de forma segura en la aguja.

Utilisez le pouce pour pousser le cache de sécurité sur l'aiguille jusqu'à ce que vous sentiez ou entendiez un clic audible, indiquant que le cache est bien verrouillé sur l'aiguille.



Once the cover is securely locked over the needle, dispose of syringe and needle in an approved sharps container.

Una vez que la tapa está bloqueada de forma segura en la aguja, deseche la jeringa y la aguja en un contenedor aprobado para elementos punzocortantes.

Une fois que le cache est bien verrouillé sur l'aiguille, jetez la seringue et l'aiguille dans un collecteur pour objets tranchants approuvé.

**Customer service/
Servicio al cliente/
Service clientèle:**
1-877-660-1900
info@htl-strefa.com

Manufactured for / Fabricado por / Fabriqué pour:
HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7, 95-035 Ozorków, Poland
T: +48 42 270 00 10, F: +48 42 270 00 20
www.htl-strefa.com, info@htl-strefa.pl
**Made in China / Fabricado en China /
Fabriqué en Chine**

Distributed by / Distribuido por / Distribué par:
HTL-STREFA, Inc.
Woodstock, GA USA
T: +1-770-528-0410, F: +1-770-528-0411
www.dropsafe.info, info@htl-strefa.com

MFR #	Size	Pack
6068	25G x 1"	100 pieces per box 8 boxes per case

