

DropSafe®

Syringe with Safety Needle

Syringe with Safety Needle


Luer Lock syringe with hinged-cap safety needle. This device is used for aspiration and administration of medication.

Jeringa con Aguja de Seguridad


Jeringa Luer Lock con aguja de seguridad con tapa abisagrada. Este dispositivo se usa para la aspiración y administración de medicamentos.

Seringue avec Aiguille de Sécurité

Seringue munie d'un Luer Lock avec aiguille de sécurité à capuchon articulé. Ce dispositif est utilisé pour l'aspiration et l'administration de médicaments.

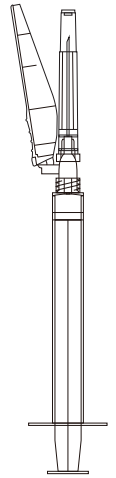


Instructions for use / Instrucciones de uso / Mode d'emploi

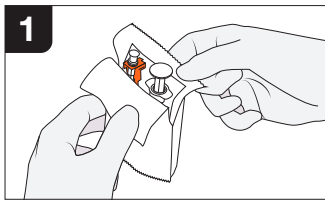

Peel blister back of the Syringe with Safety Needle using aseptic technique.

Despegue la parte de atrás del blíster de la jeringa con aguja de seguridad utilizando la técnica aséptica.


Retirez le blister à l'arrière de la seringue portant l'aiguille de sécurité en utilisant une technique d'asepsie.

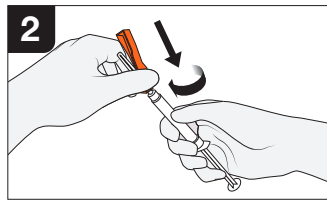

Attach the safety needle to the syringe. Ensure the attachment is firm.

Coloque la aguja de seguridad en la jeringa. Asegúrese de que el ajuste esté firme.


Fixez l'aiguille de sécurité à la seringue. Assurez-vous que la fixation est sûre.

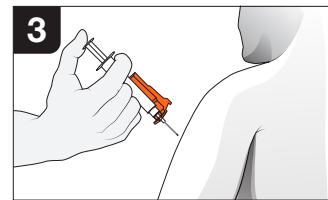

Consult the medication prescribing information. Administer the medication according to the established protocol.

Consulte la información de la prescripción del medicamento. Administre el medicamento de acuerdo con el protocolo establecido.


Consultez les informations relatives à la prescription des médicaments. Administrez le médicament selon le protocole établi.

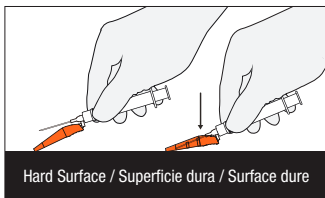


Press down on a flat surface until you feel or hear an audible click, indicating the cover is securely locked over the needle.

Presione hacia abajo sobre una superficie plana hasta que sienta o escuche un clic, lo que indica que la tapa está bloqueada de forma segura en la aguja.

Appuyez sur une surface plane jusqu'à ce que vous sentiez ou entendiez un clic audible, indiquant que le cache est bien verrouillé sur l'aiguille.

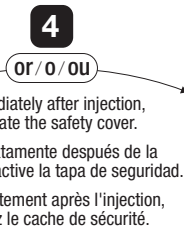


Immediately after injection, activate the safety cover.
Inmediatamente después de la inyección, active la tapa de seguridad.
Immédiatement après l'injection, activez le cache de sécurité.

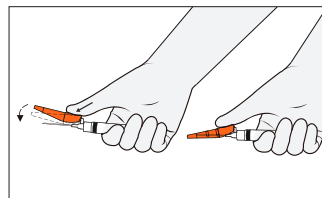

Use thumb to push the safety cover onto the needle until you feel or hear an audible click, indicating the cover is securely locked over the needle.

Utilice el pulgar para empujar la tapa de seguridad en la aguja hasta que sienta o escuche un clic, lo que indica que la tapa está bloqueada de forma segura en la aguja.

Utilisez le pouce pour pousser le cache de sécurité sur l'aiguille jusqu'à ce que vous sentiez ou entendiez un clic audible, indiquant que le cache est bien verrouillé sur l'aiguille.

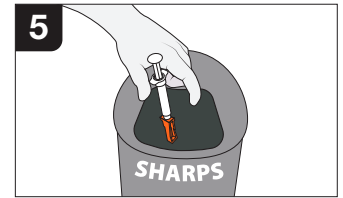

Once the cover is securely locked over the needle, dispose of syringe and needle in an approved sharps container.

Una vez que la tapa está bloqueada de forma segura en la aguja, deseche la jeringa y la aguja en un contenedor aprobado para elementos punzocortantes.

Une fois que le cache est bien verrouillé sur l'aiguille, jetez la seringue et l'aiguille dans un collecteur pour objets tranchants approuvé.

Customer service/
Servicio al cliente/
Service clientèle:
1-877-660-1900
info@htl-strefa.com

Manufactured for / Fabricado por / Fabriqué pour:
HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7, 95-035 Ozorków, Poland
T: +48 42 270 00 10, F: +48 42 270 00 20
www.htl-strefa.com, info@htl-strefa.pl
Made in China / Fabricado en China /
Fabriqué en Chine

Distributed by / Distribuido por / Distribué par:
HTL-STREFA, Inc.
Woodstock, GA USA
T: +1-770-528-0410, F: +1-770-528-0411
www.dropsafe.info, info@htl-strefa.com

MFR #	Size	Pack
6072	3mL 25G x 1"	50 pieces per box
6073	1mL 25G x 1"	6 boxes per case

